

# Stephen H Freedom

Poltrona polifunzionale



POLTRONE

Uso Frequente

Chemioterapia  
Terapia infusionale  
Day Hospital  
Donazione sangue  
Prelievi  
Pronto soccorso  
Dialisi  
Trasporto pazienti  
Dermatologia  
Cosmetica  
Polifunzionali



Elevato  
**COMFORT**

Terapia ospedaliera e ambulatoriale



[www.gardhenbalance.it](http://www.gardhenbalance.it)



**Cuscino seduta/gambe**  
**è removibile** per facilitare  
le attività di sanificazione  
del dispositivo.



**Supporto per la pulsantiera** posto bilateralmente  
sui braccioli. Codice dotazione AC25P.



**Braccioli ergonomici a regolazione multipla**



**Solidali allo Schienale**



**Girevoli**



**Inclinabili**



**Ribaltabili**




## Movimentazioni

### Sezioni schienale e gambale sincronizzate

Le movimentazioni delle sezioni schienale e gambale sincronizzate sono comandate grazie ai tasti dedicati presenti sulla pulsantiera.

Attivazione tramite  
**Pulsantiera**

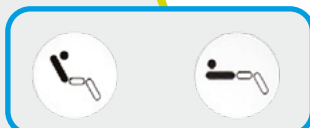

**Movimentazione  
sincronizzata**

delle sezioni schienale e gambale






## Movimentazioni Trendelenburg

La posizione di Trendelenburg è ottenibile al tasto dedicato presente sulla pulsantiera.

Attivazione tramite  
**Pulsantiera**

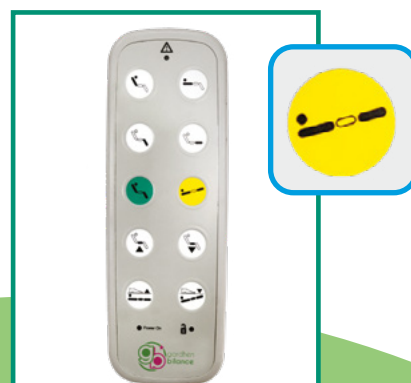

## Recliner

Altro esempio di movimentazione





## Altre caratteristiche del dispositivo medico

- Telaio in acciaio verniciato a polveri termoindurenti.
- Piano suddiviso in 3 sezioni: schienale, seduta e gambe.
- Movimentazione simultanea delle sezioni schienale e gambe tramite 1 motore.
- Posizione di trendelenburg (in alternativa shock position).
- Braccioli solidali al movimento dello schienale, con funzione di rotazione, inclinabili up/down, ribaltabili a 90°; (consultare catalogo componenti opzionali per altra tipologia di braccioli).
- Nr. 4 ruote durevoli, antistatiche, inossidabili, girevoli Ø 100mm.
- Freno simultaneo ruote posteriori in acciaio zincato - Codice dotazione AC7P1G.
- Tutte le movimentazioni della poltrona sono comandate tramite pulsantiera perimetrale dotata di cavo spiralato da 3,5 m. La pulsantiera è di facile utilizzo poiché realizzata con grandi pittogrammi a rilievo e risulta adatta anche per pazienti ipovedenti. La pulsantiera è dotata di 10 tasti con 2 memorie.  
Per la sicurezza dei pazienti la pulsantiera è fornita di chiave per inibizione dei comandi - Codice dotazione AC34P. Isolamento IP66.
- Supporto pulsantiera bilaterale - Codice dotazione AC25P.
- Cover in ABS per base - Codice dotazione AC83.
- Cover in ABS per seduta - Codice dotazione AC84.
- Cuscini soft foam indipendenti e facilmente asportabili per le sezioni seduta e gambe.
- Rivestimento similpelle ignifugo UNI 9175/87 e 9175FA-1/94 classe 1M - Codice dotazione AC87/1.

### Vuoi modificare il colore del rivestimento e del telaio?

Inquadra o clicca i QR code e scopri come personalizzare il dispositivo consultando le nostre schede colori\*.

\*Qualora non venisse espressa alcuna preferenza il dispositivo sarà fornito con il colore disponibile.

Rivestimento  
Similpelle

Rivestimento  
Siliconico

Telaio



### Vuoi implementare il dispositivo?

Inquadra il QR code e scopri tutti i componenti opzionali disponibili consultando il catalogo.



## Scheda tecnica

Codice CND/EMDN	<b>V08020101</b>
GMDN Code	<b>38447</b>
N. progressivo/R	<b>2436304/R</b>
UDI-DI di Base	<b>805771740POLPE</b>
Codice Prodotto	<b>GB0003.SP</b> Acciaio verniciato <b>GB0003.SS</b> Acciaio inox
Destinazione d'uso	Poltrona polifunzionale
Produttore	GARDHEN BILANCE SRL
Peso totale	70 kg
Ruote	Nr. 4 inossidabili girevoli da 100 mm con sistema frenante
Alimentazione	100 - 240 Vac 50/60 Hz
Motori elettrici	Bassa tensione (24 V)
Assorbimento max	4A
Isolamento	IP44
Portata Massima	200 kg
Carico di Lavoro Sicuro	235 kg

## Tipologia cavo di alimentazione





Type F - Schuko



Type L - 16A



## Tabella dimensioni

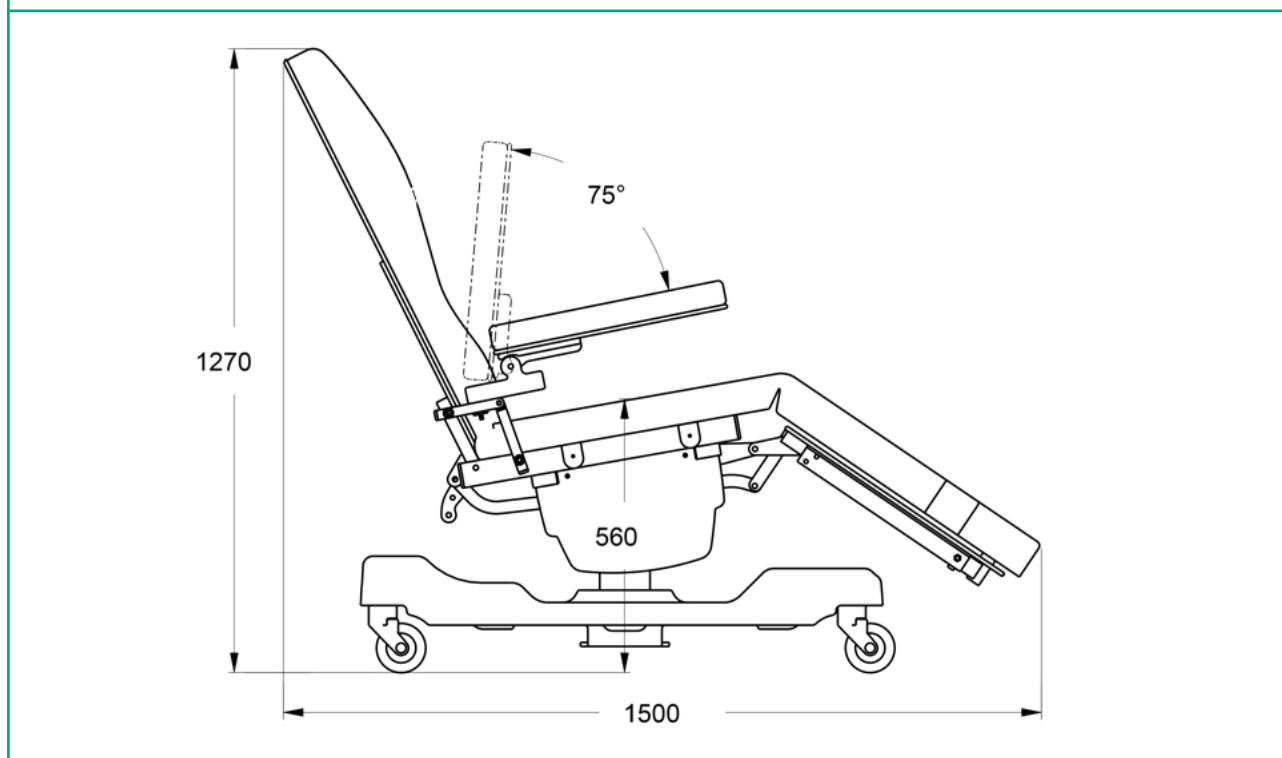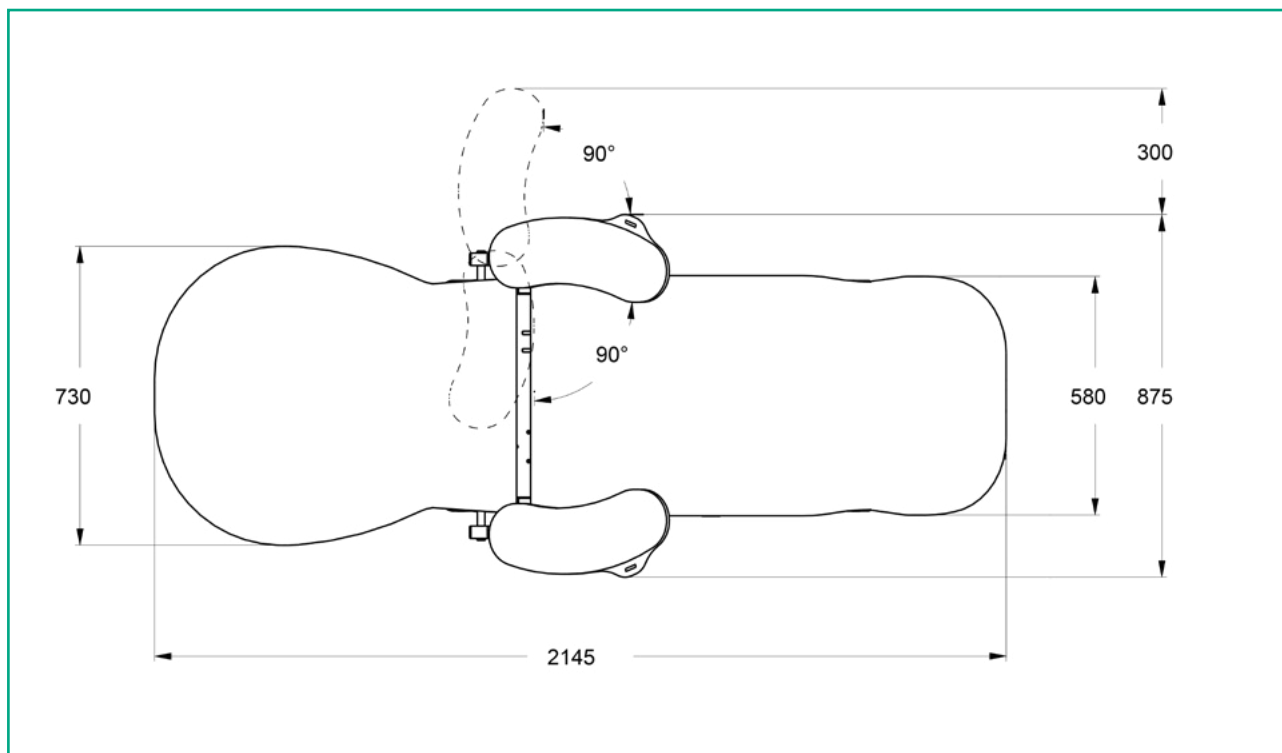

[www.gardhenbalance.it](http://www.gardhenbalance.it)



### Gardhen Balance S.r.l.

Via G. Luraghi c/o Consorzio Il Sole - lotto S -  
80038 Pomigliano d'Arco (NA) - Italy  
Tel. +39.081.8692160 pbx - Fax +39.081.8692460  
E-mail: [info@gardhenbalance.it](mailto:info@gardhenbalance.it)  
PEC: [gardhenbalance@pec.it](mailto:gardhenbalance@pec.it)

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative e i valori dimensionali sono nominali. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo componenti opzionali e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.  
Dep. 71rev. 17/10/2024

